

wellion[®] BONA[®] ANALYZER HbA1c



REINIGUNG UND WARTUNG


2. Verwenden Sie ein Wattestäbchen um mögliche Pufferreste von der Pufferöffnung aufzusaugen.



3. Entfernen Sie den benutzten Teststreifen und entsorgen Sie ihn ordnungsgemäß..



Übersicht über das Gerät

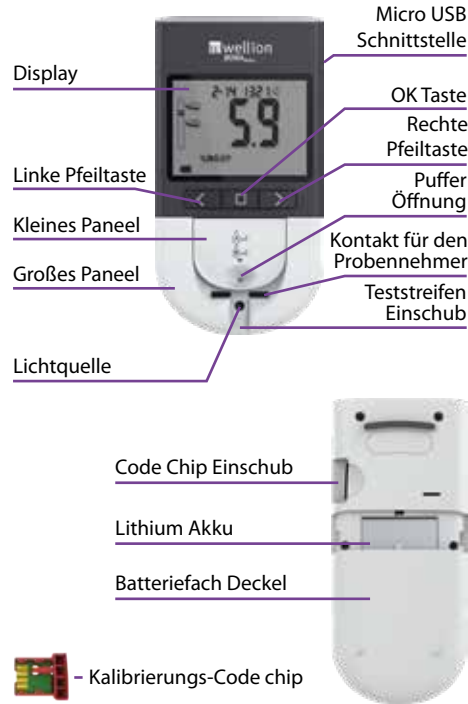

Einlegen des Akkus

- Um die Akkuabdeckung zu öffnen, schieben Sie diese abwärts.
- Legen Sie den Akku in den vorgesehenen Akkualter. Stellen Sie sicher, dass der Akku in die richtige Richtung zeigt.
- Setzen Sie die Akkuabdeckung wieder auf.



4. Nehmen Sie das große und das kleine Panel zusammen ab.



5. Reinigen Sie die Oberfläche der beiden Paneele.



6. Reinigen Sie den Lichtquellenbereich mit einem in Wasser getauchten Wattestäbchen (benutzen Sie gegebenenfalls ein in Alkohol getauchtes Wattestäbchen). Bitte verwenden Sie ein trockenes Wattestäbchen um den Bereich zu trocknen.



7. Bringen Sie beide Paneele nach der Reinigung wieder an.



Reinigung und Wartung

Der Reinigungsvorgang sollte in folgenden Fällen durchgeführt werden:

- Wenn sich Rückstände von Puffer A, Puffer B oder Blutreste am/im Messgerät befinden.
- Nach täglichem Gebrauch.
- Wenn das Messgerät durch Staub, Flüssigkeiten oder andere Verunreinigungen verschmutzt wurde.

1.



Das Messgerät sollte vor der Reinigung ausgeschaltet sein.

Falls Flüssigkeit in das Messgerät eingedrungen ist, nehmen Sie das kleine und große Panel zusammen ab und reinigen Sie die Oberflächen beider Platten.

Trennen Sie das kleine vom großen Panel.

